

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	POLİSAJ MOTORU ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu MC.TL.144	Yayın tarihi 02.10.2023	Revizyon No 0	Revizyon tarihi -	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1 / 1

1.AMAÇ:

Polisaj motoru çalıştırılma ve bakım onarımının tanımlanması

2.KAPSAM:

Bu talimat Teknik hizmetler ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.SORUMLULAR:

Teknik Servis Personeli
Cihazı Kullanan Personel

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1.CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

4.1.1.Cihazı çalıştırmadan önce mutlaka gözleri ve yüzleri yaralanmalara karşı koruyacak uygun gözlük kullanınız.

4.1.2.Uzun saçlar, bol kıyafetler, eşarp, kravat, çalışma önlüğü ve takılar polisaj motorunun dönen parçasına takılarak tehlike oluşturabilir.

4.1.3.Gerekli önlemleri almadan cihazı çalıştırmayınız.

4.1.4. Cihazın fişi prize takılır, açma düğmesine basılır.

4.1.5. Motorun uç kısımlarına istenilen keçe ve kıl fırça takılır.

4.1.6.Apareyin önce keçe ile sonra su ve pomza karışımı ile yüzey parlatması yapılır.

4.1.7.Siyah kıl fırça ile parlatmaya devam edilir.

4.1.8. Son aşamada alkol-algı karışımı beyaz fırça ile parlatma işlemi tamamlanır.

4.1.9.Kapama düğmesine basılarak cihaz fişten çekilir.

4.1.10.Cihazın temizliği yapılır.

4.1.11.Pomza tozu su ile karıştırılır.

4.1.12.Tesviyesi ve zımparası yapılmış protezler pomzayla cila yapılır.

4.1.13.Yıkanır ve paftayla parlatılır.

4.2 CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI

4.2.1 Teknik servis sorumlusu yıllık bakım ve kalibrasyon planına göre cihazın bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

4.2.2 Cihazı kullanan personel cihazlarda arıza olduğunda Arıza Bildirim Formunu doldurur ve teknik servis görevlisine arıza bildiriminde bulunur ve cihazın üzerine "**KULLANIM DIŞI EKİPMAN**" etiketi asılır.

4.2.3 Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza teknik servis tarafından giderilemeyecekse yetkili firma veya satıcı firma ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Arıza Bildirim Formu

Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Planı

Kullanım Dışı Ekipman Etiketi